



PEDRA MATIC

Aquecedor profissional para pedras de massoterapia, este aparelho foi desenvolvido com a mais alta tecnologia, para atender esta nova exigência dos profissionais de massoterapia, seu corpo foi desenvolvido em aço inox, para evitar que o contato com água venha a danificar o mesmo.

O aparelho possui termóstato, para o controle de temperatura, resistência blindada para maior segurança, luz indicadora de funcionamento e chave seletora de voltagem.

MODO DE USAR

Antes de conectar seu aparelho a rede elétrica, verifique se a voltagem na chave seletora, na parte de baixo do aparelho esta correta com a tomada a ser ligada.

Retire o plástico protetor azul do fundo e da lateral do aparelho.

Coloque as pedras de massoterapia no aparelho, e em seguida coloque água até que cubra as mesmas, lembrando que não deve ultrapassar a borda do aparelho, para que os componentes internos não tenha contato com a água, assim evitando o risco de danificar seu aparelho, um curto circuito ou ocasionar até mesmo um choque.

Em seguida ligue o aparelho colocando o botão (knob), entre a temperatura 5 ou 6, para que ocorra um aquecimento mais rápido, certifique que as pedras estejam na temperatura, que possibilite o trabalho com o seu cliente, indicamos entre o 2 e 4.

LIMPEZA DO APARELHO

A limpeza do aparelho deve ser feita logo após seu uso, com um pano umedecido com álcool, para que fique higienizado para o próximo uso.

IMPORTANTE PARA A SUA SEGURANÇA

Ao limpar o aparelho desligue-o da rede elétrica (tomada).

Não aperte nem puxe o botão quando ligar ou regular a temperatura do aparelho, pois isso ocasionará o funcionamento inadequado do aparelho.